

# ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ



## Всасывающая трубка с резиновой пробкой и спермоприемник для взятия спермы у индюков

Используется в условиях интенсивного ведения птицеводства.

Шприц можно либо полностью заполнить эякулятами, используя всасывающий шланг, либо предварительно налить в него консервационную среду ("Glutac") - для получения разбавления в соотношении 1:1. После извлечения из шприца резиновой пробки туда вставляется соответствующий плунжер. Теперь шприц можно использовать для ручного или машинного наполнения соломинок спермой. Заполненные соломинки можно немедленно использовать для осеменения.

Всасывающий шланг с резиновой пробкой и спермоприемником

для 10 мл шприца ПОЗ. : 11620/0001

для 5 мл шприца ПОЗ. : 11620/0000

Одноразовый шприц с отцентрованным люэр-адаптером и поршнем с резиновым концом, стерильный, 10 мл

ПОЗ. : 17600/0110



## Микросоломинки для спермы домашней птицы

Длина: 72 мм, закругленный конец, 100 шт./пакет, 10.000/  
коробка

ПОЗ. : 17600/0010



## Комплект для осеменения птиц

Специально разработан для индивидуального осеменения птиц при экстенсивном ведении птицеводства, (напр., разведение кур, хищных птиц). В комплект входят:

- Микропипетка
- 20 микросоломинок, прозрачные
- Разбавитель для спермы «Glutac», 5 мл.

В микросоломинку до половины наливают разбавитель «Glutac», используя микропипетку, а затем наполняют эякулятом непосредственно из клоаки.

Затем содержимое соломинки, в виде разбавителя и спермы, можно непосредственно помещать для осеменения в яйцевод женских особей птиц. Смешивание произойдет во время инфузии.

ПОЗ. : 17600/0000

## Glutac

Разбавитель для спермы индюков, петухов, хищных птиц, 5  
мл/ампула, 189 ампул в коробке.

ПОЗ. : 13600/0001



ООО "Астравет"

(925) 502-25-74, (495) 585-51-46 многоканальный, факс (499) 164-97-50

Россия, 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 29

www.astravet.ru e-mail: info@astravet.ru



Our knowledge - Your success